

Accent 800 – 1000 - 1400

Pour quels types de handicap ?



Accent est une aide à la communication dédiée au handicap, plus particulièrement aux personnes dépourvues de la parole avec troubles du langage associés, cherchant un appareil pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage et l'extérieur.

Accent permet l'affichage de grilles de 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 cases personnalisables, et permettant une organisation sur une page, en arborescence (thèmes), ou en utilisant la méthode combinatoire MINSPEAK (une méthode reconnue pour sa richesse de vocabulaire et sa spontanéité en conversation). Des grilles pré établies (word stratégie 84 cases, MiFaSoLa 45 cases) sont déjà intégrées.

Accent possède des voix de synthèse intégrées (en plus de pouvoir enregistrer sa voix), donc les messages peuvent être générés à partir d'images, de photos ou de lettres, et diffusés en voix de synthèse Homme ou Femme (réglable).

La gamme Accent a été conçu pour un usage portable, sur une table, au lit ou au fauteuil roulant. Les dispositifs disposent d'une poignée intégrée pour un maximum de portabilité.

Accent est accessible par écran tactile réglable avec intégration possible de guides doigts (option), par un défilement visuel et/ou auditif à un ou deux contacteurs adaptés à l'utilisateur, et même via un joystick fauteuil roulant (selon compatibilités) ou une souris/joystick USB. Un accès par commande oculaire est possible sur les modèles 1000 et 1400

Accent devient un appareil très polyvalent au regard des programmes de communication très simples ou élaborés qu'il est possible de générer, et aussi grâce aux différents moyens d'accès possibles. Ainsi il peut convenir à un usage collectif d'apprentissage avec une sauvegarde des données de chaque utilisateur.

Accent est un équipement autonome, qui répond aux exigences de la communication alternative : Puissance sonore, robustesse, et accessibilité.

Accent est donc particulièrement destiné aux personnes :

- IMC
- Aphasiques
- Autistes

Accent : Caractéristiques fonctionnelles

Accessibilité

- Sélection directe sur l'écran tactile capacitif (réglage des temps d'appuis et temps entre deux appuis possible pour ne pas prendre en compte les tremblements par exemple),
- Possibilité d'intégrer un guide doigts (en option).
- Défilement par un ou deux contacteurs (contacteur en option -possibilité d'utiliser des contacteurs à technologie sans fil Bluetooth)
- Défilement avec retour auditif possible (contacteur en option)
- Joystick fauteuil roulant (selon compatibilités)
- Connectivité USB pour utiliser un pointeur de tête, une souris, ou un système émulateur de souris
- Commande oculaire Nu Eye (sur accent 1000/1400), pour naviguer par le regard, avec sélection automatique /clignement /contacteur.

Actions

- Aides à la communication par images ou photos, transcrit en voix enregistrée ou voix de synthèse
- Aides à la communication textuelle, transcrit en voix de synthèse Homme ou Femmes (réglable)
- Média player intégré pour lire les fichiers MP3, WMA, et WAV en stéréo
- Possibilité de créer des scènes visuelles (photos étendues), avec des fonctions (voix, lien vers une page) « cachées » derrière l'image. Par exemple prendre une photo de famille, et lorsqu'on appuie sur « la maman », l'appareil dit « Ma maman s'appelle... ».
- Possibilité d'accéder à l'environnement Windows 8, d'accéder à internet et email.
- Connexion Bluetooth pour accès téléphonie, SMS, contacteurs, haut-parleur externe,...
- Contrôle d'environnement InfraRouge pour piloter une TV, une lumière, la domotique...

Design et ergonomie

- Portable (particulièrement pour accent 800)
- Grande puissance sonore
- Adaptation possible sur supports pour fauteuils roulant et lit.
- Autonome et résistant au choc
- Prêt à communiquer
- Ecran capacitif
- Port USB pour accès souris, sauvegarde et transfert simples et rapides de vos données.

Personnalisation

- Formats de grilles : 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 touches ou Format libre
- 6 zones pour enregistrer 6 profils d'utilisateurs dans un même appareil
- possibilité de créer des scènes visuelles pour l'apprentissage du langage
- Accéder à plus de 4500 symboles Minspeak pour personnaliser votre vocabulaire et 10000 symboles Clarity
- Accéder à plus de 8500 symboles PCS (option)
- Possibilité d'importer des symboles et des images personnelles pour personnaliser l'appareil et créer des scènes visuelles
- Facilité de création d'activités et de pages pour du vocabulaire spécialisé avec le constructeur de lexique.

Efficacité pédagogique

- Logiciel Nu Voice inclus (téléchargeable gratuitement sur site Proteor) : permet d'émuler le logiciel présent dans Accent sur votre ordinateur afin de pouvoir programmer sans l'appareil
- Grilles Minspeak intégrées : MiFaSoLa 45 cases – WordStrategy 84 cases.

ACCENT : Données techniques

	Accent 800	Accent 1000	Accent 1400
Taille (cm)	24,9 – 15 - 3,5	30,4 – 19 – 3,8	35,8 – 22,6 – 4.6
Poids	0,88Kg	1,34 Kg	2,68 Kg
Autonomie	11h à 13h (selon utilisation)	13h à 15h (selon utilisation)	18h à 20h (selon utilisation) (10-12h avec NuEye)
Ecran	Capacitif 8.1 pouces	Capacitif 10,1 pouces	Capacitif 14 pouces
Connectiques	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	3 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0) – Lecteur Carte SD – 1 port HDMI

- ✓ Support d'inclinaison pour table inclus
- ✓ Voix de synthèse : Acapela Homme et Femme réglables.
- ✓ Caméra Arrière et frontale
- ✓ Système d'exploitation Windows 8, accès possible. (par écran tactile et souris)
- ✓ Wifi
- ✓ Bluetooth pour pilotage PC, connexion contacteur sans fil, haut-parleur externe, téléphone (SMS et appel selon compatibilités)

Références

Désignation	Accent 800	Accent 1000	Accent 1400
Accent	7F06B / 7F06B-EXT3	7F03B / 7F03B-EXT3	7F14
Commande oculaire Nu eye	-	7F0201	7F0201
Guide doigts 84 cases	7F0608B	7F0315B	7F14084
Guide doigts 45 cases	7F0610B	7F0313B	7F14045
Sacoche accent	7F0611	7F0304	Sac à dos 7F0110
Protection accent	7F0607	7F0312	Protection écran 7F0109
Bandoulière		7F0302	7F0111
Boucles pour bandoulière		7F0303	
Pack alimentation externe		7F0307	
Chargeur Allume Cigare pour Accent		7F0308	
Symbole PCS (8500)		ZZAAA	
Adaptateur bluetooth usb pour pc et mac		7N7804	
Contacteur bluetooth		7N7805	
Support roulettes RHD Telescopique (TS)/(LA)		7R02	
Support roulettes RHD Pliable/(TS)/(LA)		7R03	
Adaptateur Rehadapt / Accent		7R20	
Support pour fauteuil sur mesure		ZZVMW	
Assistance technique Proteor Premium 2 ans, 3 ans ou 5 ans		706201ATPCO	
Formation Accent et Minspeak sur 2 jours, pour 2 personnes à Paris. Maniement de l'appareil et initiation au concept Minspeak		ZZFORMA	

Accompagnement

Par la société Proteor et son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis plus de 30 ans*
- *Formation spécifique sur deux jours pour deux personnes possible (une journée sur le concept de communication Minspeak et une journée d'apprentissage à la programmation et utilisation de l'appareil)*
- *Installation/mise en service possible*
- *Présentation sur place*
- *Devis gratuit*
- *Maintenance spécifique*
- *Possibilité d'explication et d'assistance par téléphone (gratuit)*
- *Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la panne)*

Contacts et renseignements

Proteor aides électroniques



aides.electroniques@proteor.com

03 80 78 42 20

Formulaire de demande d'évaluation sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

Assistance technique Proteor Premium

Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail



support@proteor.com

03 80 78 42 49

Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :
www.aides.electroniques.proteor.fr