

TELO

HANDICAP TECHNOLOGIE
PROTEOR




*Besoin d'aide supplémentaire ?
Aller dans la rubrique:
Contrôle d'environnement
et choisir : TELO*

Manuel de démarrage rapide

www.aides.electroniques.proteor.fr

Composition

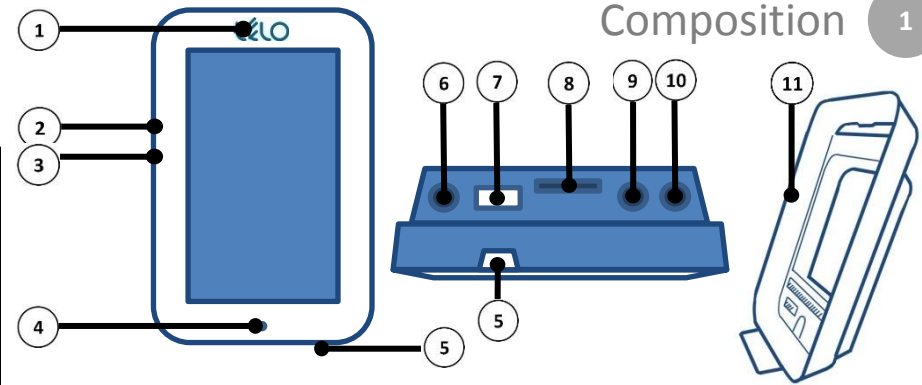

1	Haut parleur
2	Bouton RESET
3	Port micro SD
4	Microphone
5	Port d'alimentation et port PC




6	Port micro externe
7	Port USB
8	Port relais et joystick
9 10	Ports contacteurs 1 et 2
11	Support

Installation

2

1. Branchez la batterie
2. Vissez la trappe arrière
3. Branchez TELO au secteur

Remarque : avant d'utiliser votre nouveau TELO, vous devez le charger complètement pendant 24h.

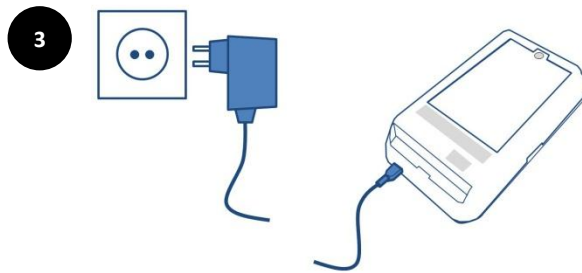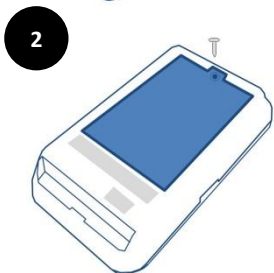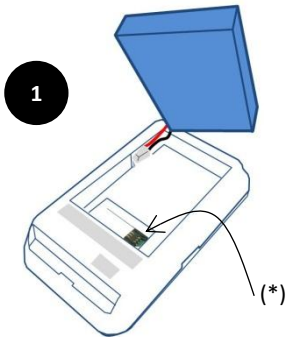


* Emplacement pour carte SIM

Installation


2

Pour fixer TELO au support

1. Vissez le support du TELO au bras
2. Fixer TELO au support

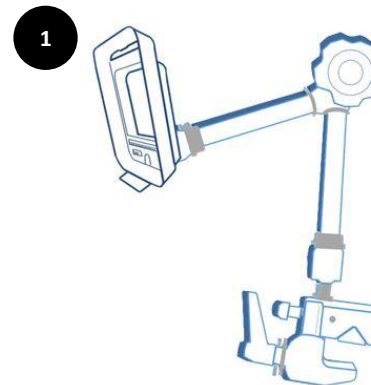

A. Emboîter TELO vers le haut du support

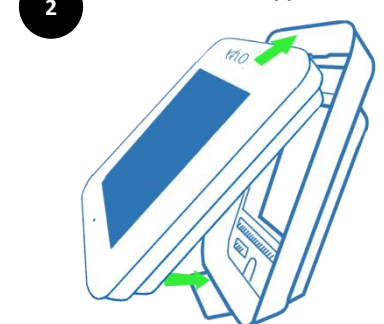

B. Clipper TELO avec le bas du support (entendre un clic !)

Démarrage

3

Après la charge de TELO :

1. **Appuyez sur le bouton RESET** : aidez-vous d'un trombone par exemple.
2. **Attendez 10 à 30 s (*)** : une page de garde apparait
3. **Accédez au menu Réglages** : pour configurer le TELO .

2



Pour accéder aux réglages :

- Appuyer dans le coin gauche en haut
- Appuyer ensuite en haut dans le coin droit

3



**Une seconde fois si TELO ne se réveille pas
(Penser à sauvegarder après chaque nouveau réglage)*

Détails du menu Réglages

4

Calibrer TELO*.
Gérer utilisateur, heure/date, affichage, sons, localisation, luminosité, etc...

Créer, modifier ou supprimer des pages

Connecter TELO au Bluetooth, au Wifi, au GSM ou à la radio Zwave.

Régler les paramètres de l'écran tactile, des contacteurs filaires ou sans fil ou du joystick.

Gérer la synthèse et reconnaissance vocales

Sauvegarder vos pages ou restaurer votre TELO

Contrôler le curseur d'un PC

Arrêter TELO

Revenir à la page de garde.

** Il est conseillé de calibrer TELO au démarrage*

Création d'une page perso

5



→ Création page → page personnalisable

1. **Nommer la page et choisir sa structure** : choisissez le nombre de lignes et de colonnes constituant la grille de la page.
2. **Attribuer des propriétés aux touches** : choisissez une icône et/ou un texte et/ou une couleur pour différencier la touche des autres.
3. **Attribuer des actions derrière les touches** : choisissez l'action qui s'enclenchera lors de la validation de la touche.
 - 14 différentes actions : *code infrarouge(*)*, *aller vers page prédéfinie* (pages SMS(*), lecture SMS(*), GSM(*), Bluetooth et Internet), *aller vers autre page*, *pause défilement*, *commande relais 1 ou 2*, *alarme*, *défilement auditif*, *lecture vocale*, *actions souris IR / GSM / Bluetooth / WiFi* et *répertoire tel*.
 - 1 pour *supprimer les actions* derrière une touche
4. **Attribuer un code de localisation** : si vous possédez des balises de localisation dans votre environnement.
5. **Attribuer comme page de garde** : si désiré

** Détaillé dans le document*

Apprentissage d'un code infrarouge

6

1. **Choisir le mode d'apprentissage** : ON/OFF et/ou Toggle ou par défaut
2. **Détecter la télécommande** : placer la télécommande en vis-à-vis de TELO à une distance d'environ 10 cm et appuyer sur une de ses touches.
 - Si TELO détecte : « Télécommande détectée » + signal sonore
 - Si TELO ne détecte pas : déplacez la télécommande et réessayez
3. **Ne plus bouger la télécommande** : lorsqu'elle a été détectée par TELO.
4. **Apprendre le code** : appuyez sur Apprendre, puis sur le bouton du code à apprendre et suivre les instructions jusqu'à « Code OK » + signal sonore.
5. **Tester le code** : optionnel, appuyez sur Test pour vérifier que le code appris a bien fonctionné : dans ce cas, le récepteur réagit à l'envoi du code IR.
6. **Sauvegarder le code IR sur la touche** : quand vous êtes sûr de l'apprentissage du code, appuyez sur Sauvegarder. Faites retour pour passer à une autre touche de votre page

Il est possible de réaliser une macro de codes IR, pour cela : appuyez sur macro « macro 1 » s'affiche, appuyez sur apprendre et sauvegarder le code appris, appuyez sur macro 1, « macro 2 » s'affiche, apprenez et sauvegardez, etc...



→ Activer **Bluetooth** → Réglages Bluetooth

1. **Activer le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth**
2. **Rechercher tous les périphériques équipés du Bluetooth** : appuyez sur Lancer la recherche ; attendez que le sablier disparaisse (10^{aine} de secondes).
3. **S'appairer au périphérique** : choisissez le périphérique dans le menu déroulant et appuyez sur Connecter ; si nécessaire entrer le code 0000; le message « connexion établie » confirme l'appairage



→ Activer **WiFi** → Réglages WiFi

1. **Rechercher des réseaux WiFi** : la recherche se fait automatiquement une fois dans l'onglet Réglages WiFi
2. **Se connecter au réseau WiFi**: appuyez sur l'identifiant de l'appareil fonctionnant en WiFi ; entrer la clé WiFi ; le message « connexion établie » confirme la connexion au réseau WiFi.



→ Ecran Tactile

1. **Choisir le mode de prise en compte** : mode appui ou relâché
2. **Régler les temporisations** : choisissez le temps d'appui pour que la validation prenne effet et le temps entre deux appuis.
3. **Attribuer un bip lors d'appui** : activation ou non, volume du bip



→ Joystick

1. **Choisir le type et le mode du joystick**
2. **Régler la temporisation**
3. **Régler la vitesse de défilement**



→ Contacteurs

Pour un contacteur filaire

1. **Brancher le contacteur** (gravé 2 sur le TELO)
2. **Activer Contacteur filaire**
3. **Activer un seul contacteur** : activez Mode contacteur
4. **Paramétrer le contacteur** : allez dans Paramètres contact. 1 ; voir les différents réglages ci-après dans 4.Paramétrer le contacteur sans fil



→ Contacteurs

Pour un contacteur sans fil


1. **Brancher le contacteur à un émetteur sans fil**
2. **Activer Contacteur sans fil**
3. **Appairer le contacteur** : allez dans Contacteur sans fil ; appuyez sur Appairer; activez votre contacteur ; le message « Contacteur appairé » apparait lorsque que l'appairage est bien effectué. Dans le cas contraire, réessayez.
4. **Paramétrer le contacteur sans fil** : (Paramètre contact. 1 pour un contacteur sans fil)
 - Réglez les temporisations (temps appui, entre appuis et appel)
 - Réglez le défilement : type, vitesse, nombre et reprise ; etc ...

Paramètres supplémentaires sur les contacteurs :

- **Ajouter un 2nd contacteur filaire** (en 3 sur le TELO) : réglez Paramètres contact. 2 ;
- **Définir l'écran comme un contacteur** : activez Ecran = Contacteur
- **Attribuer un retour sonore au défilement** : activez Défilement auditif, attribuez des descriptions aux touches avec l'action « Défilement auditif » et activez la synthèse vocale dans Communication.

1. **Insérer une carte SIM** : veillez à ce que TELO soit éteint.
2. **Activer le GSM**: Connexion → GSM
3. **Appeler et recevoir un appel**:
 - **Attribuer la page GSM à une touche** : Définir actions touche → aller vers page prédéfinie → page GSM
 - Voir détails des touches ci-après
4. **Envoyer un SMS** :
 - **Attribuer la page SMS à une touche** : Définir actions touche → aller vers page prédéfinie → page SMS
 - Voir détails des touches ci-après
5. **Lire un SMS** :
 - **Attribuer la page Lecture SMS à une touche** : Définir actions touche → aller vers page prédéfinie → page Lecture SMS
 - Appuyer sur le SMS pour le lire
 - Appuyer à nouveau pour y répondre : vous êtes redirigé vers la page SMS et le n° de tel est inscrit automatiquement.

Remarque : des contacts peuvent être enregistrés dans Configuration → Répertoire tel

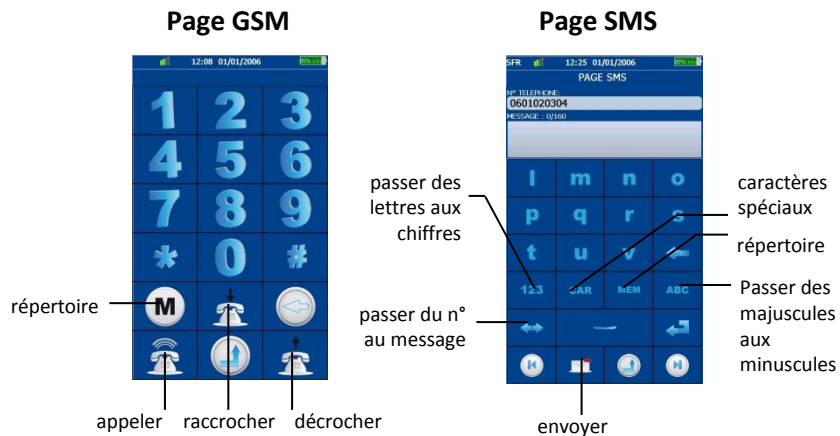

1 - TÉLO respecte les directives et normes suivantes :

- ✓ Directive 89/336 (*compatibilité électromagnétique*)
- ✓ Normes EN 60601-1-2
- ✓ EN 12182
- ✓ EN301 489-3
- ✓ EN 301 489-17
- ✓ Directive 93/42 (*dispositifs médicaux*)
- ✓ EN55022
- ✓ EN55024
- ✓ EN 300 220-3

2 - TÉLO n'est pas destiné à être porté de façon permanente à la main.

3 - TÉLO doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec ses accessoires d'origine :

- ✓ 7T602, 7T603, 7T604, 7T605, 7T606, 7T607, 7T608, 7T609
(*liste non exhaustive*)

4 - TÉLO ne doit pas être utilisé en cas d'état de santé (physique ou mental) incompatible avec l'usage prévu

PROTEOR décline toute responsabilité :

- En cas d'utilisation d'accessoires non autorisés.
- En cas de dégât(s) causé(s) par les appareils commandés par TÉLO.

Il est **interdit** de démonter TÉLO. Tout démontage doit être effectué par les **services techniques PROTEOR** ou par des services agréés. Afin d'éviter une chute de TÉLO, il est demandé d'utiliser les accessoires d'origine ; **en cas de chute** : tester toutes les fonctions (Clavier, contacteur ou contacteur sans fil, joystick, émission infra rouge, module Bluetooth®, WIFI, GSM & radio, ...).

Il est **fortement déconseillé** de brancher TELO lorsqu'il y a de l'orage, risque de d'électrocution ou de choc électrique en cas de surtension.